

PROCEDURE RECUEIL DE TETES FEMORALES

1 Kit de prélèvement contient 3 éléments :

- 1 boîte et son sachet de transport dans un emballage double stérile
- 2 tubes de sang et leur sachet de transport
- 1 dossier de traçabilité intitulé « Formulaire de Prélèvement » contenant : fiche de prélèvement, lettre d'information du donneur, étiquettes autocollantes Biobank, plus 2 petites étiquettes « code-barre » à utiliser pour votre traçabilité interne (cahier de bloc...)

PROCEDURE :

1. Ouvrir le double sachet et poser la boîte sur la table stérile, ou bien encore présenter la boîte à l'instrumentiste en dehors du champ (à votre convenance). Garder hors de la zone stérile les tubes de sang et le dossier de traçabilité.
2. Compléter les étiquettes du formulaire de prélèvement ou coller les étiquettes « patient » sur toutes les étiquettes autocollantes Biobank.
3. Mettre la tête fémorale telle qu'elle a été réséquée dans la boîte sans rien d'autre. Verrouiller le couvercle puis coller l'étiquette autocollante Biobank sur la boîte. Mettre la boîte dans son sachet de transport. Enlever la protection de l'adhésif et fermer avec précaution pour assurer l'étanchéité. Une fois fermé on ne peut plus l'ouvrir.
4. Avant, pendant ou après l'intervention, prélever 2 tubes de sang veineux (tube sec avec gel séparateur). Coller les étiquettes autocollantes Biobank sur les tubes de sang. Mettre les tubes dans leur sachet de transport. Enlever la protection de l'adhésif et fermer avec précaution pour assurer l'étanchéité.
5. Dossier de traçabilité : Remplir les critères d'exclusions de la Fiche de prélèvement (blanche pour Biobank, bleu pour dossier patient) et faire signer par le chirurgien ou l'anesthésiste.
Demander au chirurgien la Lettre d'information du donneur signée par le patient.
Transmettre la Lettre d'information vierge du kit aux consultations pour les prochains patients.
6. Après l'intervention :

Prendre le sac transparent du kit et mettre dedans :

- Le sachet avec la tête fémorale
- La fiche de prélèvement blanche
- La lettre d'information du donneur signée par le patient

**PLACER DANS LE CONGELATEUR A UNE
TEMPERATURE ≤ A -20°C**

Prendre le sachet des tubes sang avec les 2 tubes dedans :

**PLACER AU REFRIGERATEUR A UNE TEMPERATURE
ENTRE +2°C ET + 8°**