


## Seringue pré-remplie de granules d'os BIOBank

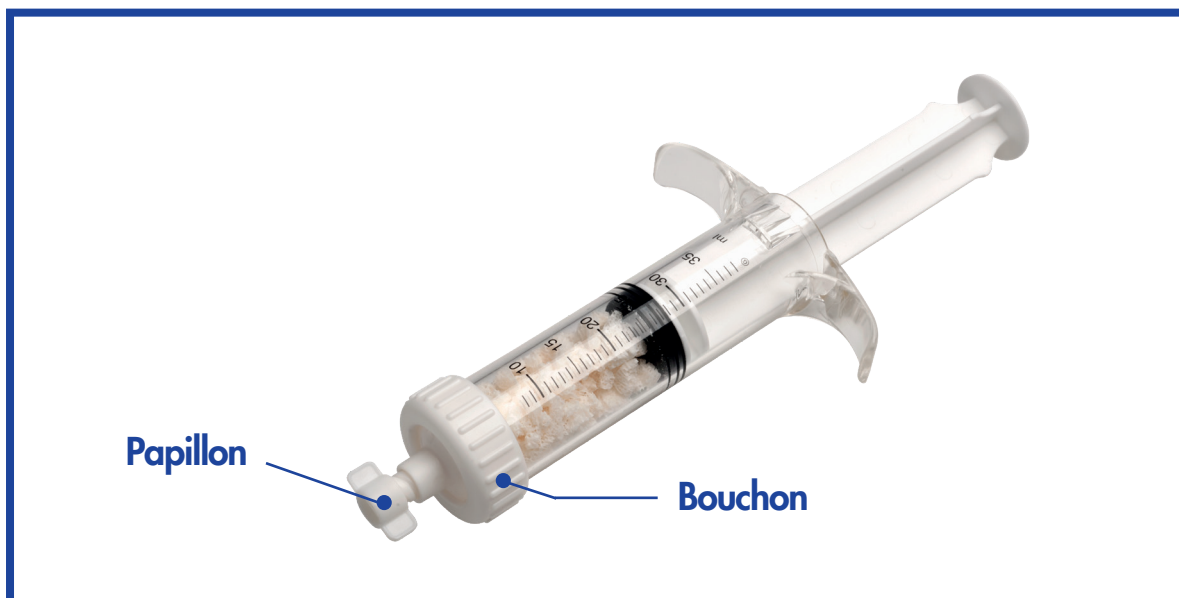

- 1** Dévisser le papillon
- 2** Aspirer le liquide, sang du patient ou sérum physiologique stérile, pour hydrater entièrement les granules d'os
- 3** Expulser l'excédent de liquide en poussant sur le piston
- 4** Reboucher
- 5** Laisser en contact avec le liquide pendant 2 à 3 minutes
- 6** Dévisser le bouchon du corps de seringue
- 7** Pousser sur le piston pour introduire les granules d'os réhydratés dans le site de greffe