

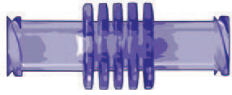
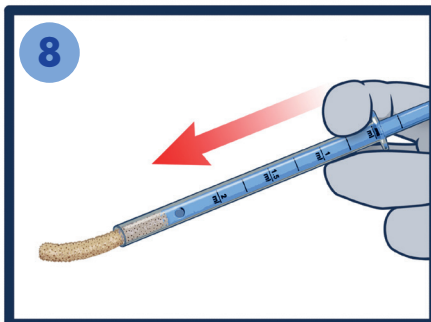
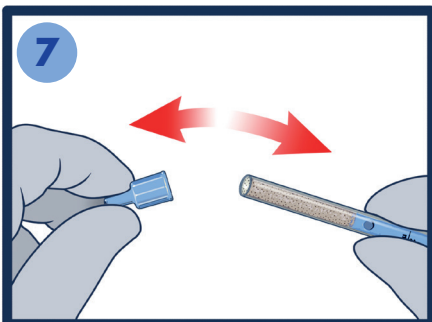
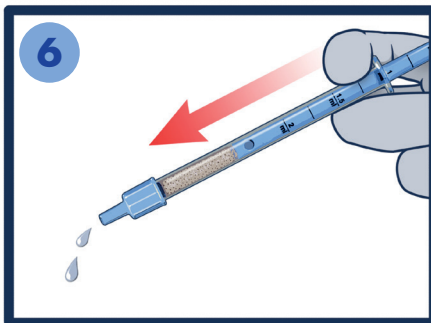
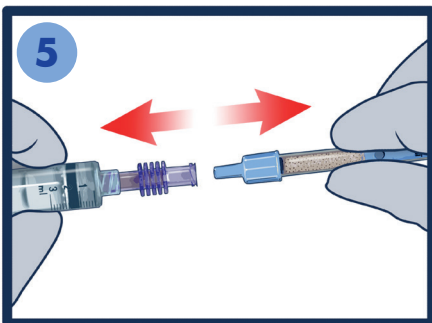
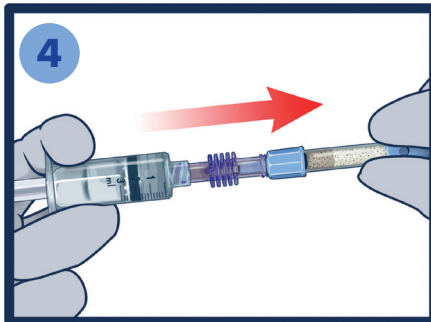
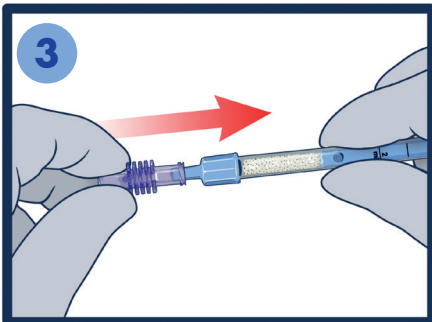


Conector Luer lock*

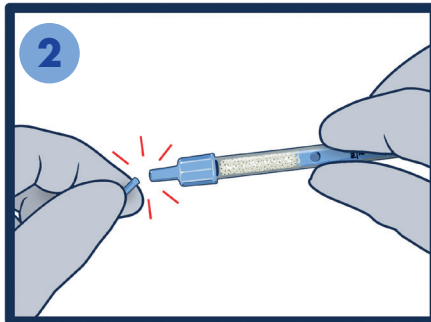

Jeringa precargada con polvo de hueso BIOBank

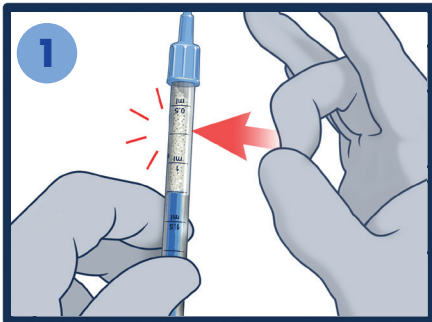

1 Retire hacia atrás el pistón (≈ 0,25 ml) y golpee la jeringa para descomprimir el polvo

2 Rompa la punta del tapón

3 Conecte el conector Luer Lock suministrado a la jeringa

4 Conecte una jeringa llena con una solución estéril de cloruro de sodio. Transfiera asépticamente el líquido hasta el pistón para hidratar completamente el polvo

5 Desconectar la jeringa BIOBank

6 Espere unos minutos y luego expulse el exceso de líquido empujando el pistón

7 Quitar el tapón

8 Empuje el émbolo para introducir el polvo de hueso BIOBank rehidratado en el sitio de injerto

* El accesorio de bloqueo Luer es un dispositivo médico estéril suministrado como accesorio