

NOTICE D'UTILISATION

SERINGUE PRÉ-REMPLEIE DE GRANULES D'OS BIOBANK



- 01** ≡ Dévisser le papillon
- 02** ≡ Aspirer une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour hydrater entièrement les granules d'os
- 03** ≡ Expulser l'excédent de liquide en poussant sur le piston
- 04** ≡ Reboucher
- 05** ≡ Laisser en contact avec le liquide pendant **10 minutes**
- 06** ≡ Dévisser le bouchon du corps de seringue
- 07** ≡ Pousser sur le piston pour introduire les granules d'os réhydratés dans le site de greffe